

myVisionTrack (mVT)

Aplicación móvil para pacientes: instrucciones de uso

myVisionTrack Rx only 

 **BrightInsight**
6201 America Center Drive,
San Jose, CA 95002, USA

Android UDI - (01)860003376102
iOS UDI - (01)860003376157
HCP Portal UDI - (01)860003376119

Información general	2
Uso previsto	2
Limitaciones de uso	2
Descripción del producto.....	2
Advertencias y precauciones	2
Contraindicaciones.....	3
Entorno para el uso.....	3
Compatibilidad y seguridad.....	3
Primeros pasos.....	4
Invitación e instalación	4
Cómo crear la cuenta.....	5
Cómo usar myVisionTrack.....	6
Inicio de sesión	6
Pantalla de inicio.....	6
Descripción general de la actividad de SDH	6
Antes de iniciar la actividad de SDH	7
Cómo completar las actividades de SDH.....	8
Opciones de la pantalla de menú.....	9
Contáctenos	10

Información general

Uso previsto

mVT está destinado a la detección y caracterización de la metamorfopsia central de tres grados (distorsión visual) y como ayuda para controlar los cambios en la metamorfopsia (por ejemplo, debido al deterioro de la enfermedad o a los tratamientos) en pacientes con maculopatías.

Además, mVT está destinado a ser utilizado por pacientes que tengan la capacidad para realizar periódicamente una autoprueba sencilla en el hogar y por los proveedores de atención médica que tengan acceso a los resultados de las pruebas.

El objetivo de mVT no es diagnosticar. El diagnóstico es responsabilidad del proveedor de atención médica que lo receta.

Limitaciones de uso

Los datos proporcionados por mVT no deben utilizarse como fundamento para posponer o cancelar citas periódicas con su proveedor de atención médica.

Descripción del producto

myVisionTrack (mVT) es un software seguro basado en la nube que consta de una aplicación móvil que se ejecuta en un teléfono inteligente o una tableta (aplicación móvil para pacientes) y un portal web (portal de proveedores de atención médica).

La aplicación mVT permite a los pacientes probar su función visual en el hogar, y un portal web ayuda a los proveedores de atención médica (HCP, por sus siglas en inglés) y a su personal a administrar a los pacientes y ver los resultados de las pruebas.

Además, la aplicación mVT incorpora una actividad de hiperagudeza para la distinción de formas (SDH, por sus siglas en inglés o Actividad con formas), que se ha demostrado que es precisa para detectar cambios significativos en la función visual.

La aplicación mVT es fácil de usar y permite realizar autopruebas frecuentes y sin supervisión a los pacientes que reciben atención clínica de rutina. Los pacientes pueden configurar recordatorios para realizar autopruebas periódicas, y los HCP y su personal pueden recibir notificaciones en el portal web y por correo electrónico sobre cambios significativos en la función visual.

Los proveedores de atención médica indican el uso de la aplicación mVT a los siguientes pacientes:

- mayores de 18 años,
- capaces de utilizar correctamente un teléfono inteligente.

Advertencias y precauciones

La información de salud proporcionada a través de la aplicación mVT no sustituye el asesoramiento de un proveedor de atención médica calificado.

mVT no brinda interpretación de los resultados de las pruebas, no ofrece recomendaciones de tratamiento ni proporciona diagnósticos. No utilice este producto como herramienta de autodiagnóstico.

Siempre comunique cualquier pregunta que pueda tener sobre los resultados de la actividad visual, su afección médica o tratamiento directamente a su proveedor de atención médica.

Si nota un cambio en su visión, comuníquese con su proveedor de atención médica.

La aplicación debe ser utilizada únicamente por el paciente al que se le recetó para garantizar la confiabilidad de los datos proporcionados al proveedor de atención médica.

Siga cuidadosamente las instrucciones de prueba de la aplicación para evaluar el ojo correcto. Realizar la prueba en ambos ojos al mismo tiempo o en el ojo incorrecto hace que se envíen resultados inexactos a su proveedor de atención médica.

Contraindicaciones

Ninguna detectada.

Entorno para el uso

La aplicación mVT debe usarse en un entorno con iluminación adecuada donde pueda colocar su teléfono inteligente o tableta en una posición estable. Consulte la sección “Antes de iniciar la actividad de SDH” para obtener más información sobre la configuración de la autopruueba.

Compatibilidad y seguridad

La aplicación mVT está disponible para teléfonos inteligentes o tabletas móviles iOS y Android y se puede descargar en las tiendas de aplicaciones correspondientes. La compatibilidad se indica en las tiendas de aplicaciones.

mVT es una aplicación recetada y, si bien puede estar disponible para que la descarguen usuarios a los que no se indique su uso, necesitará que un proveedor de atención médica participante lo invite antes de usar la aplicación.

Instale y actualice esta aplicación únicamente desde las listas oficiales de la tienda de aplicaciones mVT y asegúrese de tener la última versión instalada (o habilite las actualizaciones automáticas de la aplicación). Esta aplicación solo debe usarse en teléfonos o tabletas que ejecuten sistemas operativos móviles oficiales.

Su proveedor de atención médica lo invitará a usar la aplicación con su dirección de correo electrónico única y un código de verificación único que se le enviará a su número de teléfono móvil.

Una vez que se registre, creará una contraseña segura que cumpla con los requisitos de contraseña de la aplicación. No comparta su información de inicio de sesión con otras personas ni utilice esta aplicación en redes no seguras.

Primeros pasos

Invitación e instalación

Su invitación para mVT: su HCP creará la invitación con los siguientes datos:

- Dirección de correo electrónico: esta será su usuario de inicio de sesión en la aplicación.
- Número de teléfono móvil: se enviará una invitación por mensaje de texto con un enlace de descarga y un código de verificación.

Descargar la aplicación mVT: busque “mVT” en la App Store de Apple o Play Store de Google y descargue la aplicación en su teléfono inteligente o tableta, o utilice el enlace de descarga de la invitación que recibió por mensaje de texto.

Nota sobre permisos: es posible que se le solicite que habilite permisos opcionales:

- Notificaciones: configure recordatorios de notificación para completar las actividades para la visión programadas.
- Biometría: inicie sesión en la aplicación con los datos biométricos si los habilitó en su teléfono inteligente o tableta.
- Cámara: permite medir la luz ambiental y la distancia mientras se realizan actividades visuales.

Cómo crear la cuenta

Abra la aplicación para crear la cuenta. Desde la pantalla de inicio de sesión, haga lo siguiente:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Toque “Register now” (Registrarse ahora). 2. Ingrese la dirección de correo electrónico que proporcionó a su HCP. 3. Toque “Next” (Siguiente). 4. Ingrese el código de la invitación que recibió por mensaje de texto y toque “Next” (Siguiente). 	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Cree su contraseña y toque “Next” (Siguiente). 6. Revise y acepte los Términos y condiciones y toque “Submit and Continue” (Enviar y continuar). 7. Revise y acepte la Política de privacidad y toque “Submit and Done” (Enviar y terminar). 	
<ol style="list-style-type: none"> 8. El registro ya está completo. Vea la información de su cuenta en “About You” (Su información). Toque “All Set” (¡Listo!) y accederá a la pantalla de inicio. 	

Cómo usar myVisionTrack

Inicio de sesión

Una vez completado el registro, utilizará la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta y la contraseña actual para iniciar sesión en la aplicación.

Pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, puede iniciar una actividad visual, ver métricas relacionadas con sus actividades visuales completadas y ver o configurar recordatorios para realizar una actividad de la visión.

1. Iniciar una actividad	
2. Ver métricas de la actividad	
3. Ver siguiente recordatorio	
4. Administrar recordatorios	
5. Navegar a la pantalla de menú	

Descripción general de la actividad de SDH

En la actividad de hiperagudeza para la distinción de formas (SDH o formas) se le mostrarán varias formas en la pantalla y usted deberá tocar la forma que se vea diferente de las demás.

Su HCP puede indicarle que realice pruebas en uno o en ambos ojos. Se examinará un ojo a la vez, y usted deberá cubrir con la palma de su mano el ojo que no se esté evaluando. La actividad tarda aproximadamente de 2 a 3 minutos por ojo.

Para cada ojo en que se realice una prueba, habrá múltiples rondas de la actividad, y en cada ronda será más difícil o más fácil identificar qué forma se ve diferente de las demás.

Siempre llegará a un punto en el que será difícil identificar qué forma se ve diferente de las demás. Cuando llegue a este punto, puede adivinar.

Antes de iniciar la actividad de SDH

Antes de iniciar la actividad, desconecte su teléfono inteligente o tableta del tomacorriente:

Recomendamos que desconecte el cable de su teléfono inteligente o tableta antes de iniciar una sesión para que no interfiera con su capacidad para completar la actividad.

Conexión a Internet y a la red:

Recomendamos que su teléfono inteligente o tableta esté conectado a Internet mientras realiza las actividades. Verifique su teléfono inteligente o tableta para asegurarse de que haya una conexión wifi o de datos móviles antes de comenzar una actividad.

Controle la pantalla:

Revise la pantalla para ver si hay manchas y grietas. Si hay manchas, limpie la pantalla con un paño suave antes de realizar la prueba. No debe realizar la actividad en un teléfono inteligente o una tableta que tenga la pantalla rota.

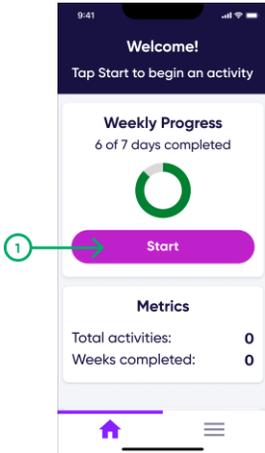
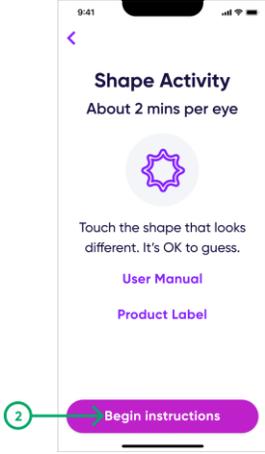
Posicionamiento:

Coloque o sostenga su teléfono inteligente o tableta a la misma distancia en que colocaría un periódico o un libro para leer. Si tiene dificultades para sostenerlo, considere usar un soporte para el teléfono inteligente o la tableta durante la actividad. Instale el soporte sobre una mesa y coloque su teléfono inteligente o tableta de forma vertical de modo que su parte inferior quede ubicada en la parte inferior del soporte.

Iluminación:

Elija un lugar tranquilo para realizar la actividad. Tome asiento en una habitación con iluminación moderada, lejos de ventanas o resplandor de la luz superior.

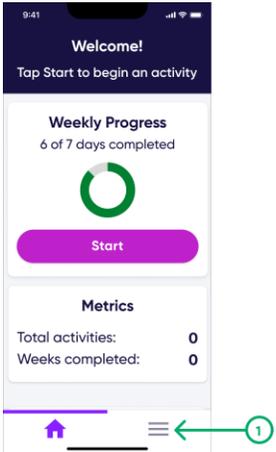
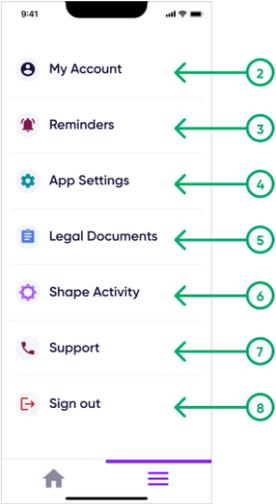
Cómo completar las actividades de SDH

<p>1. Toque “Start” (Inicio) en la pantalla de inicio.</p>	
<p>2. La primera vez que inicie una actividad, se le pedirá que vea las instrucciones de la prueba previas a la actividad. Toque “Begin Instructions” (Comenzar con las instrucciones) para continuar.</p> <p>Después de completar la primera actividad, tendrá la opción de omitir las instrucciones.</p> <p>Siempre podrá volver a ver las instrucciones de la prueba previas a la actividad; para esto, vaya a la pantalla de menú, toque “Shape Activity” (Actividad con formas) y, luego, toque “Test Instructions” (Instrucciones de la prueba).</p>	

Siga las instrucciones que se muestran en la aplicación para completar la actividad.

Opciones de la pantalla de menú

Vaya a la pantalla de menú para ver funciones adicionales y acceder a la configuración de la aplicación.

<p>1. Toque el botón del menú en la pantalla de inicio.</p>	
<p>2. My Account (Mi cuenta): vea información de la cuenta, actualice su contraseña o elimine la cuenta.</p> <p>3. Reminders (Recordatorios): cree, edite o elimine recordatorios.</p> <p>4. App Settings (Configuración de la aplicación): administre notificaciones y permisos biométricos, configuración de idiomas, configuración de tamaño de texto.</p> <p>5. Legal Documents (Documentos legales): vea los Términos y condiciones y la Política de privacidad.</p> <p>6. Shape Activity (Actividad con formas): vea las instrucciones de la prueba previas a la actividad, el manual del usuario y la etiqueta del producto.</p> <p>7. Support (Asistencia): vea la información de contacto para asistencia.</p> <p>8. Sign Out (Cerrar sesión): cierre sesión en la aplicación.</p>	

Contáctenos

Puede ponerse en contacto con la asistencia técnica en la siguiente dirección de correo electrónico o número de teléfono:

Para clientes de los Estados Unidos

mvt_support@gene.com

+1 855 774 8632

Copyright © 2023 BrightInsight, Inc. Todos los derechos reservados. La reproducción o transmisión total o parcial, en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico o de otro tipo, está prohibida sin el consentimiento previo por escrito de BrightInsight, Inc.